

< 1 6 - 1 1 >
2 0 1 6 年 4 月

先生各位

投与薬剤フルベストラントの エストラジオール（E2）測定値への影響について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、標記項目の試薬製造販売元より、薬剤フルベストラントを投与されている患者様において、測定値が高値傾向となるとの連絡がございましたのでご案内申し上げます。

謹白

記

■対象項目： エストラジオール（E2） 【項目コード：2250】

■内 容：

閉経後乳癌治療剤として用いられている薬剤「フルベストラント（商品名：フェソロデックス筋注 250mg）を投与されている患者様においてエストラジオール（E2）の測定値が高値傾向となることが判明しました。

エストラジオール（E2）測定試薬とフルベストラントへの交差反応性は、1.2%と軽微ですが、血中フルベストラント濃度がエストラジオール（E2）濃度に対して非常に高濃度であるため、測定値に対しては大きな影響を及ぼす可能性があることが分かりました。よってエストロゲン状態の不適切な臨床的評価につながる可能性があります。

以上