

< 20 - 01 >
2020年01月

先生各位

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、唾液によるがんリスク スクリーニング検査として、「サリバチェッカー[®]」の受託を開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内申し上げます。

謹白

記

■新規受託項目:

サリバチェッカー[®]

[項目コード: 4302]

■新規受託開始日:

2020年 1月 20日(月)受付分より

以上

※裏面をご覧ください。

● サリバチェッカー[®]

唾液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みません。唾液中の成分の大部分は血液由来のため、がん細胞から浸み出す代謝物は血管を通り、唾液中に浸み出します。

本検査は、唾液中のポリアミンの濃度を解析することにより、一度に「肺がん、膵がん、大腸がん、乳がん、口腔がん」の5種類のがんについて、現在がんの疑いがあるかどうかを調べるリスクスクリーニング検査です。

人間の唾液には、安静時唾液・刺激唾液の2種類があります。サリバチェッカー[®]は血液成分に近いといわれる「安静時唾液」を用いて検査を行っています。

■ 検査概要:

項目コード	4302
検査項目名	サリバチェッカー
検体量	唾液 0.1 mL
容器	専用容器
保存方法	絶対凍結
検査方法	ポリアミン濃度解析
解析対象がん	肺がん、膵がん、大腸がん、乳がん、口腔がん
報告日数	21日
備考	安静にしているときに自然に出る唾液を採取してください。

※検査結果につきましては、対象がん腫毎にご報告いたします。

■ 留意事項:

- ・食事やうがい等の刺激によって分泌される唾液のご提出はお避けください。
- ・唾液の採取方法につきましては、専用容器の説明書をご参照ください。

<ご案内>

検査ご希望の際には専用容器・専用依頼書が必要となりますので、弊社担当営業までご連絡ください。